





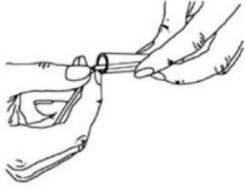
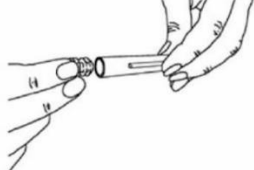
INSTRUKCJA POBRANIA

Przeczytaj instrukcję przed pobraniem próbki

Uwagi przed pobraniem próbki:

1. NIE jedz, NIE pij, NIE pal, NIE żuj gumy I NIE myj zębów 20 minut przed pobraniem próbki.
2. Przepłucz usta wodą bezpośrednio przed pobraniem próbki.
3. Użyj zestawu do pobrania tylko jeśli wacik pozostaje nienaruszony

Pobranie próbki

<p>1</p> 	<p>Otwórz opakowanie z jednej strony.</p>
<p>2</p> 	<p>Wyjmij wymazówkę z próbówki, uważając, aby nie dotknąć palcami wacika.</p>
<p>3</p> 	<p>Włóż wacik do ust i potrzyj mocno o policzek lub pod dolną i górną wargą. Pocieraj przez 1 minutę.</p>
<p>4</p> 	<p>Umieść wymazówkę w próbówce, nie dotykając wacika palcami.</p>
<p>5</p> 	<p>Przełam wymazówkę wzdłuż zagłębienia na uchwycie. Końcówka z wacikiem powinna pozostać w próbówce.</p>
<p>6</p> 	<p>Szczelnie zamknij próbówkę za pomocą nasadki dołączonej do zestawu.</p>