





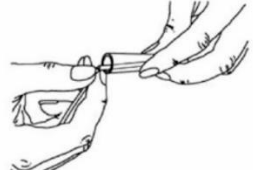

## INSTRUKCJA POBRANIA

Przeczytaj instrukcję przed pobraniem próbki

### Uwagi przed pobraniem próbki:

1. NIE jedz, NIE pij, NIE pal, NIE żuj gumy I NIE myj zębów 30 minut przed pobraniem próbki.
2. Przepłucz usta wodą bezpośrednio przed pobraniem próbki.
3. Użyj zestawu do pobrania tylko jeśli wacik pozostaje nienaruszony
4. Kapsułka susząca znajdującą się w srebrnej folii powinna mieć kolor pomarańczowy i po wchłonięciu wilgoci zmienia kolor na zielony. Jeśli bezpośrednio po wyjęciu z folii kapsułka jest zielona oznacza to że miała już kontakt z wilgocią i nie nadaje się do użycia.

### Pobranie próbki

<p><b>1</b></p> 	<p>Otwórz opakowanie z wymazówką z jednej strony.</p>
<p><b>2</b></p> 	<p>Wyjmij wymazówkę z probówki, uważając, aby nie dotknąć palcami wacika.</p>
<p><b>3</b></p> 	<p>Włóż wacik do ust i potrzyj mocno o policzek lub pod dolną i górną wargą. Pocieraż przez 1 minutę (30 sek. z prawej strony policzka i 30 sek z lewej strony policzka).</p>
<p><b>4</b></p> 	<p>Umieść wymazówkę w probówce, nie dotykając wacika palcami.</p>
<p><b>5</b></p> 	<p>Przełam wymazówkę wzdłuż zagłębienia na uchwycie. Końcówka z wacikiem powinna pozostać w probówce.</p>
<p><b>6</b></p> 	<p>Wyjmij z foliowego opakowania kapsułkę suszącą i umieść w probówce tak żeby znajdowała się na czubku patyczka. Szczelnie zamknij probówkę za pomocą nasadki dołączonej do zestawu.</p>